


**Комплексная Вакуумная  
система родовспоможения  
KIWI**

**Kiwi™**

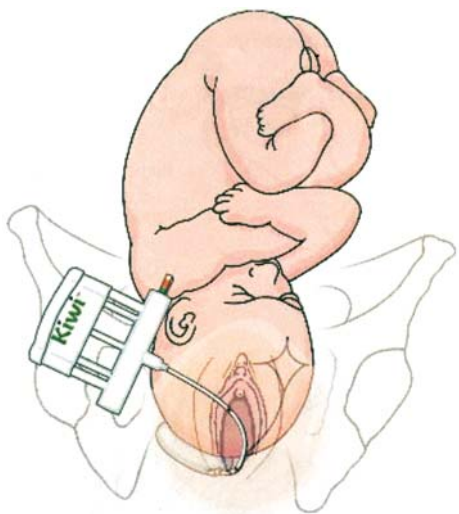

Система родовспоможения KIWI – это комплексное устройство для вакуумной экстракции плода (в головном предлежании и при проведении операции Кесарева Сечения), разработанное для полностью самостоятельного приема родов акушером без помощи ассистента.

Применяется система в периоде изгнания плода.



**Kiwi™**

**КОМПЛЕКСНАЯ ВАКУУМНАЯ  
СИСТЕМА РОДОВСПОМОЖЕНИЯ  
KIWI  
с устройством PalmPump™**



**Компания «МКНТ»**

эксклюзивный дистрибьютор в России  
производителя данного продукта компании  
«CLINICAL INNOVATION» (США)  
117105, Москва, Варшавское шоссе, 17,  
строение 9, этаж 1  
Тел: +7 (495) 786 3963  
Факс: +7 (495) 788 9855

## Система KIWI состоит из:


**Устройство Palm Pump™** сосредоточивает полный контроль над родами в руках одного акушера и, таким образом, освобождает персонал родильной палаты.

Интегральная конструкция системы PalmPump содержит:

- Простой ручной вакуумный насос,
- Клапан сброса разрежения, открываемый большим или иными пальцами
- Точный индикатор разрежения.



**Чашечка OmniCup (жесткая)** применяется для всех предлежаний, включая асинклитические задние затылочные предлежания и низкое поперечное стояние стреловидного шва. Отличается малой глубиной.

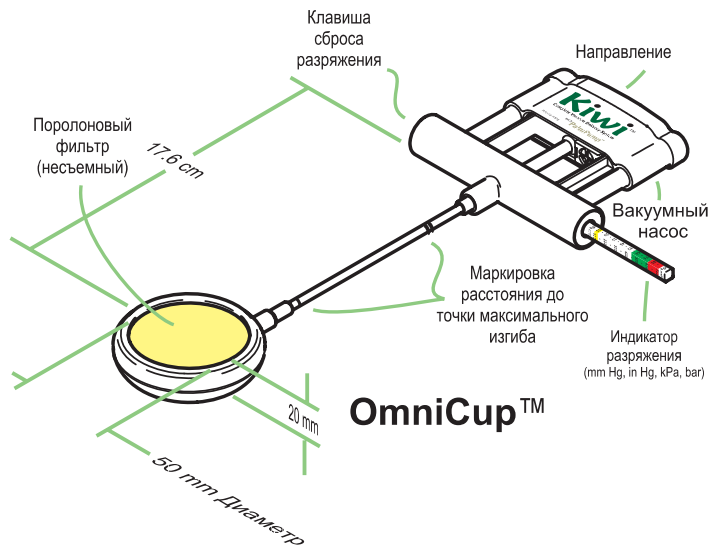

## Чашечка Omni Cup MT™


Универсальная чашечка с индикатором силы тракций. Отличается от Omni Cup тем, что имеет индикатор силы тракции, что позволяет акушеру контролировать не только разрежение создаваемое в чашечке, но и силу тракции с которой производится вакуум-экстракция.



**Чашечка Omni-C Cup™** сконструирована специально для брюшной полости с малым внутренним объемом. Данная чашечка более узкая, чем универсальная и имеет выемки для пальцев, что делает более удобным введение и размещение чашечки на проводной точке головке плода при операции кесарево сечение.



**Чашечка ProCup (мягкая куполообразная)** предназначена для использования при низком положении головки плода и переднем виде затылочных предлежаний, а также выходных предлежаниях плода. Снижает родовую опухоль. Мягкая и гибкая чашечка охватывает головку плода и присасывается к ней, что значительно увеличивает площадь контакта и удержание за счет разрежения.

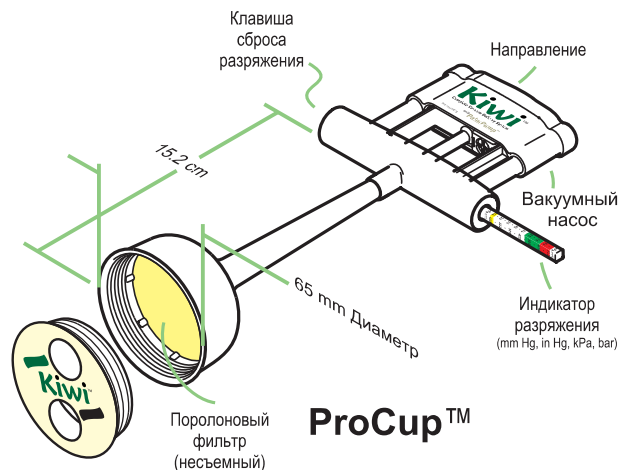

## Преимущества систем KIWI:

- Минимальный травматизм для головки плода
- Индивидуальная стерильная упаковка
- Простота использования
- Универсальность применения
- Не требует подготовки перед использованием (дополнительной сборки)
- Безопасное и эффективное разрежение насоса (посредству нажатия одной кнопки)
- Позволяет осуществлять полный самостоятельный контроль процесса родов в руках одного акушера без помощи ассистента
- Большой опыт применения в клиниках Америки, Европы и Австралии
- Разработанные методики применения